

Gebrauchsanleitung Sonic Wave Generator (SWG) 3.0

1. Legen Sie die Kontaktlinsen in den mitgelieferten Aufbewahrungsbehälter.
Füllen Sie beide Seiten vollständig mit Ihrer All in One Lösung (Open Reload).
2. Platzieren Sie das SWG 3.0 auf einen glatten Tisch, Badezimmerschränkchen oder mit Hilfe des Saugnapfes senkrecht an einem Spiegel. Um das Vibrationsgeräusch zu vermeiden, können Sie das Gerät auch auf ein Handtuch legen.
3. Wählen Sie die gewünschte Aktion durch Drücken der entsprechenden Taste:
Links= Schnellspülen (16 Sek.) oder Rechts= Reinigungsprogramm (6 Stunden mit 15 Minuten Zyklen)

Achtung:

Für einen problemlosen Gebrauch beachten Sie bitte die folgenden Schritte (vor der Inbetriebnahme das Gerät ca. 2 Stunden aufladen).

Das Gerät ist NICHT wasserdicht, vermeiden Sie daher direkten Wasserkontakt.

Das Gehäuse ist versiegelt und lässt sich nicht öffnen.

Hinweise:

Das Reinigungsprogramm kann jederzeit unterbrochen werden.

Hierzu bitte beide Tasten (R/L) für ca. 1 Sekunde gleichzeitig drücken.

Das LCD Display mit dem 30-Tage Timer kann durch gleichzeitiges Drücken der beiden Tasten für 5 Sekunden, zurückgestellt werden. Das Gerät blinkt und der Timer wird auf 30 zurück gestellt.

Achten Sie darauf, das Gerät mindestens einmal monatlich, oder bei leerem Akku aufzuladen. Bedarf aufzuladen.

Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku vollständig entladen ist.

Sie können das Gerät auch wie ein Mobiltelefon, an der Ladestation belassen und benutzen.

Ein vollständiges Aufladen des Akkus dauert ca. 2 Stunden.

Fehlerbehebung:

Falls das Gerät nicht reagiert, versuchen Sie bitte Folgendes:

1. Drücken Sie die R/L Tasten gleichzeitig. Dies ist die die „reset“ Kombination für das Gerät.
2. Versuchen Sie, das Gerät erneut aufzuladen. Das grüne Licht zeigt verfügbare Spannung an, das orangefarbene den Ladevorgang an. Sobald das Gerät aufgeladen ist, erlischt das orangefarbene Licht.
3. Falls es wiederholt zu Startproblemen kommt oder die blauen LEDs willkürlich blinken, legen Sie das Gerät auf eine andere Oberfläche und weg von anderen elektrischen Geräten

4. Falls „Lo“ auf dem Display erscheint, bedeutet dies, dass der Akku bald leer ist. bitte laden Sie das SWG 3.0 schnellstens auf.

Es wird empfohlen, das mitgelieferte USB Kabel zum Aufladen zu verwenden. Falls Sie Probleme beim Aufladen haben, versuchen Sie es über eine andere USB Verbindung. Beispielsweise einen Computerausgang, ein Telefonladekabel mit Micro-USB und Ähnliches. Der Ladestrom hat ca. 200mA, was USB V1.0 und höher entspricht (in der Regel funktioniert jeder USB Anschluss).

Der magnetische Clip für den Aufbewahrungsbehälter ist wiederverwendbar.

Ziehen Sie vorsichtig die sechs kleinen Halterungen von dem Behälter weg und der Clip löst sich. Jetzt können Sie diesen an einen frischen Safilens Behälter anklicken.

Der voll geschützte und abgesicherte Lithium-Ionen-Akku hält normalerweise ca. 300 komplette Aufladungen. Die Leistung beträgt 3.7V / 350mAh.