



AVIZOR

NOVOXY

one
step

bio

Novoxy One Step Bio ist eine moderne, einfache und wirksame Methode für die tägliche Pflege von Kontaktlinsen.

Von der desinfizierenden Wirkung des Wasserstoffperoxids und der gleichzeitigen Wirkung einer Tablette mit einer sorgfältig studierten Formel ausgehend, erreicht man eine Verstärkung der Desinfektionswirkung, eine starke Erhöhung der (in Bezug auf Proteinablagerungen selektiven) Reinigungswirkung und eine langsame und vollständige Neutralisierung des Peroxids, das in eine anwendungsgerechte Kochsalzlösung umgewandelt wird: • pH-neutral. • Isotonisch zur Tränenflüssigkeit. • Frei von Konservierungsstoffen jeglicher Art. So können die vollständig gereinigten, desinfizierten, hydratisierten und auf ihre ursprünglichen Werte gebrachten Kontaktlinsen in die Augen eingesetzt werden. Das Novoxy One Step Bio-System besteht aus: • Flasche mit Lösung. • Blister mit Tabletten. • Kontaktlinsenbehälter mit elastischem Ventil.

GEBRAUCHSANLEITUNG: • Bis zur Behältermarkierung mit Novoxy One Step Bio-Lösung anfüllen. • Die beiden Kontaktlinsen in die jeweils dafür vorgesehenen Körbchen legen. • Eine Tablette in den Behälter geben und den Deckel mit den Linsenkörbchen aufschrauben. • Den Kontaktlinsenbehälter kurz schütteln. Niemals die Lösung ohne Neutralisierungstablette verwenden. • Mindestens zwei Stunden abwarten, bis der Reinigungs-Desinfektions- und Neutralisierungsprozess abgeschlossen ist. • Die Linsen können nach Ablauf von zwei Stunden verwendet werden oder die ganze Nacht im Kontaktlinsenbehälter bleiben. • Die Neutralizationstablette beinhaltet Chlorophyll. Nach Beendigung des Prozesses, färbt sich die Lösung in dem sich die Linsen befinden, in eine leicht grünliche Farbe. Dies bedeutet, dass die Tablette Ihre Funktion erfüllt hat. • Kontaktlinsenbehälter kurz schütteln. • Die Linsen aus den Linsenkörbchen nehmen und mit gewaschenen, von Seifenresten befreiten Händen einsetzen. • Den Inhalt des Kontaktlinsenbehälters leeren. Den Linsenbehälter bis zum nächsten Gebrauch verschließen.

Datum der letzten Neubearbeitung: 2009/11

ZU BEACHTEN: • Vor jeglicher Handhabung der Kontaktlinsen, die notwendigen hygienischen Sicherheitsvorkehrungen beachten (Zum Beispiel, Hände waschen). • Darauf achten, daß die Ausgangslösung nicht mit der Haut in Berührung kommt. Falls nötig, mit fließendem Wasser abspülen. • Produkt nicht verwenden, wenn die Versiegelung vor dem ersten Gebrauch fehlt oder beschädigt ist. • Lösung nicht einnehmen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. • Lösung nach dem Öffnen des Behälters maximal 60 Tage verwenden. • Flasche immer gut verschlossen aufbewahren. • Nach Abschluss des Reinigungs- und Desinfektionsvorgangs, befinden sich die Kontaktlinsen in einer sterilen Lösung OHNE KONSERVIERUNGSMITTEL. • Wenn die Linsen nicht jeden Tag verwendet werden, verschwindet nach einigen Tagen die grüne Tönung der Lösung. Da keine Konservierungsstoffe vorhanden sind, zeigt diese fehlende Tönung an, daß so viel Zeit vergangen ist, daß eine erneute Desinfektion vor dem Einsetzen der Linsen empfehlenswert ist. • Wenn die Linsen nicht täglich verwendet werden, wird empfohlen, um mögliche Verschmutzungen zu vermeiden, die Lösung nach der Behandlung durch eine Lösung mit Konservierungsstoffen zu ersetzen, zum Beispiel, Avizor Kochsalzlösung. • Avizor Kochsalzlösung kann auch in Fällen, in denen die Linsen abgespült werden müssen (weil sie aus Versehen fallen gelassen wurden, zeitweise aus den Augen entfernt werden sollen, usw...) anstelle einer Desinfektionsbehandlung mit Novoxy One Step Bio verwendet werden. • In Ausnahmefällen, in denen aufgrund der Physiologie des Benutzers Proteinablagerungen in Mengen produziert werden, die mit dem Novoxy One Step Bio-System nicht entfernt werden können, kann die Behandlung durch eine Protein Entfernung ergänzt werden. Dafür wäre, nach Rücksprache mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten, die Verwendung von Avizor Enzymen geeignet. • Lösung aus dem Kontaktlinsenbehälter nach jedem Gebrauch wegschütten. • Benutzen Sie zum Abspülen des Linsenbehälters auf keinen Fall Leitungswasser. • Bei Zimmertemperatur aufbewahren. • Bei Reizung der Augen suchen Sie bitte einen Spezialisten auf. • Bevor Sie als Kontaktlinsenträger Augenmedikamente benutzen, informieren Sie Ihren Augenarzt. • Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden. • Nicht verwenden, wenn Sie auf einen Inhaltsstoff allergisch reagieren. • Die nicht neutralisierte Desinfektionslösung nicht direkt mit den Augen in Kontakt bringen.