

ⓐ **Einphasen-Pflegesystem:** Zum desinfizieren, reinigen und aufbewahren für alle weichen Kontaktlinsen. Nicht für farbige Kontaktlinsen geeignet!

Die Peroxidlösung wird durch eine spezielle Platinscheibe im Innern des mitgelieferten Kontaktlinsenbehälters langsam neutralisiert.

Indikationen: Desinfektion, Reinigung, Aufbewahrung und Beseitigung von Eiweißablagerungen von weichen Kontaktlinsen, einschließlich der aus Silikon-Hydrogel.

Sicherheitshinweise: Ausschließlich den beigegeführten Spezialkontaktlinsenbehälter mit Platin-Katalysatorscheibe benutzen. Keine anderen Kontaktlinsenbehälter mit der Peroxidlösung verwenden und keine anderen Pflegesysteme mit dem mitgelieferten Kontaktlinsenbehälter verwenden, da der Behälter auf diese Peroxidlösung abgestimmt ist und nur in Kombination damit einwandfrei funktioniert. Unneutralisierte Peroxidlösung darf niemals in das Auge gelangen! Das darin enthaltene Wasserstoffperoxid verursacht starkes Brennen. Sollte dies passieren, das geöffnete Auge mit viel Wasser ausspülen. Die Kontaktlinsen mindestens 6 Stunden oder über Nacht in der Lösung belassen, damit die Neutralisation komplett abgeschlossen werden kann. Für empfindliche Augen empfiehlt es sich, die Kontaktlinsen vor dem Aufsetzen mit Kochsalzlösung abzuspülen.

Zusammensetzung:

Wasserstoffperoxid, Natriumchlorid und Methylphosphonsäure, Phosphatpuffer. Enthält kein Chlorhexidin, Thimerosal, Benzalkoniumchlorid, Phenoxyethanol oder Bestandteile tierischen Ursprungs.

Anwendungshinweise, Warnungen und Gegenanzeigen: Lesen Sie sorgfältig die Packungsbeilage.

 **Omisan** farmaceutici
via G. Galilei, Guidonia M. (Rm) Italy

 **MPG&E**

distributed by MPG&E Handel und Service GmbH,
Moorweg 105, D-24582 Bordesholm, www.mpge.de