



# cleadew GP Handhabung – einfach und leicht

## Ein-Schritt Hygienesystem ohne manuelle Oberflächenreinigung


Die Tablette und die Lösung in den Behälter geben. Die Kontaktlinsen können nach vier Stunden abgespült und wieder aufgesetzt werden. Da die Desinfektion, die Reinigung und Neutralisation automatisch erfolgen, kann das Vergessen der Neutralisation nicht geschehen.



## Handhabung


### 1. Desinfektion, Reinigung und Neutralisation

- Kontaktlinsen in den Behälter geben.
- Den Behälter auf einer Seite verschließen. Neutralisationstablette zugeben und den Behälter zu 90 % mit der orange getönten Desinfektions- und Reinigungslösung füllen.
- Den Behälter fest verschließen.
- Die Kontaktlinsen für vier Stunden oder über Nacht einlagern.
- Vor dem Tragen – überprüfen, dass die Kontaktlinsen und die Flüssigkeit farblos sind.

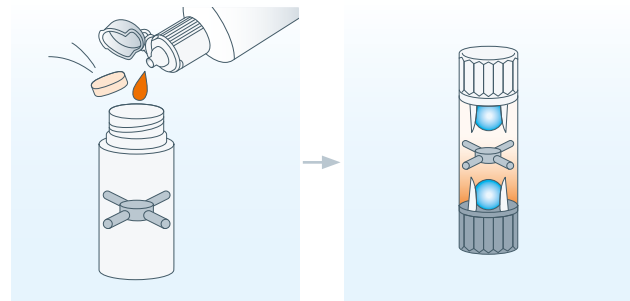

### 2. Abspülen

- Öffnen des Behälters auf einer Seite und die Lösung verwerfen.
- Den Behälter zu 60 % mit steriler Kochsalzlösung füllen und den Behälter fest verschließen.
- Den Behälter gut schütteln.
- Die Lösung verwerfen und den Vorgang noch einmal wiederholen. Die Kontaktlinsen aus dem Behälter nehmen und aufsetzen.

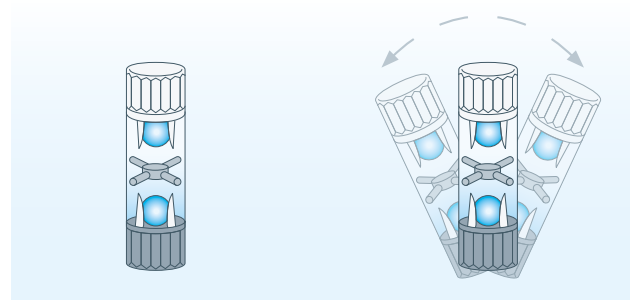

### 3. Behälterhygiene

- Den Behälter mit steriler Kochsalzlösung ausspülen und an der Luft trocknen lassen.