

# CONCARE® CLASSIC Reiniger

## Reinigungslösung

Zur täglichen Reinigung von  
gasdurchlässigen formstabilen  
Kontaktlinsen

## Solution de nettoyage

Au nettoyage quotidien des  
lentilles de contact rigides  
perméables au gaz

## Soluzione detergente

Per la pulizia quotidiana  
delle lenti a contatto rigide  
gas-permeabili

 **HECHT**  
Sichtbar besser

## DE: Gebrauchsanweisung

Der CONCARE® CLASSIC Reiniger dient zur täglichen Reinigung von gasdurchlässigen formstabilen Kontaktlinsen.

Die Reinigungswirkung des CONCARE® CLASSIC Reinigers wird durch kleinste Teilchen in der Lösung garantiert, die Ablagerungen auf der Kontaktlinsen entfernen.

### GEBRAUCHSANLEITUNG:

1. Waschen Sie Ihre Hände.
2. Flasche vor jedem Gebrauch gut schütteln.
3. Legen Sie die Linse auf die Handfläche geben Sie einen Tropfen CONCARE® CLASSIC Reinigungslösung auf die Linse.
4. Reiben Sie sie diese vorsichtig ca. 10 bis 20 Sekunden zwischen den Fingerkuppen.
5. Spülen Sie die Linse mit reichlich CONCARE® CLASSIC Aufbewahrung oder CONCARE® Kochsalzlösung ab, um den CONCARE® CLASSIC Reiniger völlig zu entfernen.
6. Füllen Sie die CONCARE® CLASSIC Aufbewahrungslösung in den Aufbewahrungsbehälter und legen Sie die Linsen über Nacht jedoch mindestens für 6 Stunden in den Behälter.

### VORSICHTMASSNAHMEN:

- Das Produkt ist nicht geeignet für weiche Kontaktlinsen.
- Diese Lösung nicht ins Auge bringen, falls doch mit Wasser ausspülen.
- Flasche nach Gebrauch gut verschließen.
- Tropferspitze nicht mit dem Finger berühren.
- Kontrollieren Sie vor der ersten Verwendung des Produktes, ob der Verschluss intakt ist.
- Innerhalb von 90 Tagen nach Öffnen der Flasche verbrauchen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie gegen einen der Bestandteile allergisch sind.

### ZUSAMMENSETZUNG:

Natriumchlorid, Laurylthethersulfat, Silikat, Titandioxid, Borsäure, Natriumtriborborat, Dinatriumedetat 0,1% und Polyhexamethylenbiguanid 0,001% in gereinigtem Wasser.