

# Alcon Kontaktlinsen-Pflegesysteme

	<p><b>AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde®</b></p> 	<p><b>AOSEPT® PLUS</b></p> 	<p><b>OPTI-FREE® PureMoist®</b></p> 	<p><b>OPTI-FREE® Replenish®</b></p> 
<p><b>Systemtyp</b></p>	<p>3%iges Wasserstoff-Peroxid Neutralisation durch Platinkatalysator</p>	<p>3%iges Wasserstoff-Peroxid Neutralisation durch Platinkatalysator</p>	<p>Multifunktions-Desinfektionslösung</p>	<p>Multifunktions-Desinfektionslösung</p>
<p><b>Reinigungs- und Desinfektionsleistung</b></p>	<p>Die Kombination aus dem integrierten Poloxamer Pluronic 17R4 mit dem mechanischen Sprudeffekt sorgt für eine effiziente Ablösung von Proteinablagerungen<sup>1</sup></p> <p>Herausragende Desinfektion – über ISO-Standards hinaus<sup>2</sup></p> <p>Wasserstoffperoxid dringt in die Linse ein und wirkt effizient gegenüber verschiedenen Keimen<sup>3</sup></p>	<p>Die Kombination aus dem integrierten Poloxamer Pluronic 17R4 mit dem mechanischen Sprudeffekt sorgt für eine effiziente Ablösung von Proteinablagerungen<sup>1</sup></p> <p>Herausragende Desinfektion – über ISO-Standards hinaus<sup>2</sup></p> <p>Wasserstoffperoxid dringt in die Linse ein und wirkt effizient gegenüber verschiedenen Keimen<sup>3</sup></p>	<p>Desinfektion über ISO-Standards hinaus<sup>5,6</sup></p> <p>Duale Desinfektion durch Polyquad und Aldox leistet deutlich mehr als gefordert<sup>5,6</sup></p> <p>Reduziert Lipidablagerungen und entfernt Proteine<sup>5,6</sup></p>	<p>Desinfektion über ISO-Standards hinaus<sup>5,6</sup></p> <p>Duale Desinfektion durch Polyquad und Aldox leistet deutlich mehr als gefordert<sup>5,6</sup></p>
<p><b>Komfort-Extras</b></p>	<p>Die einzigartige HydraGlyde® Moisture Matrix bildet ein Feuchtigkeitskissen über der gesamten Kontaktlinsenoberfläche und sorgt damit für lang anhaltende Feuchtigkeit und verringerte Reibung<sup>4</sup></p>	<p>Tiefenreinigung für lang anhaltenden Tragekomfort</p>	<p>Bis zu 16 Stunden anhaltender Tragekomfort und Feuchtigkeit<sup>5,7</sup></p> <p>Die einzigartige HydraGlyde® Moisture Matrix bildet ein Feuchtigkeitskissen über der gesamten Kontaktlinsenoberfläche</p>	<p>Bindet Feuchtigkeit an der Linsenoberfläche (TearGlyde®) und konditioniert die Linse für lang anhaltenden Tragekomfort</p>
<p><b>Kompatibilität</b></p>	<p>Kompatibel mit allen weichen Kontaktlinsen, einschließlich Silikon-Hydrogelen</p>			
<p><b>Mindest-Einlagerungszeit</b></p>	<p>Auch für formstabile Kontaktlinsen</p> <p>6 Stunden</p>	<p>Auch für formstabile Kontaktlinsen</p> <p>6 Stunden</p>	<p>6 Stunden</p>	<p>6 Stunden</p>
<p><b>Maximale Aufbewahrungszeit im verschlossenen Behälter</b></p>	<p>14 Tage</p>	<p>14 Tage</p>	<p>30 Tage</p>	<p>30 Tage</p>

1. Kiel JE. Protein removal from soft contact lenses using disinfection/neutralization with hydrogen peroxide catalytic disc. Clin Ther. 1993;15(1):30-35. 2. Gabriel M, McAnally C, et al. Biocidal Efficacy of a New Hydrogen Peroxide System Against Bacteria, Fungi and Acanthamoeba species. Optom Vis Sci. 2014; E-abstract 145192. 3. Mowrey-McKee M, George M. Contact lens solution efficacy against Acanthamoeba castellani. Eye Contact Lens. 2007;33(5):211-215. 4. Muya L, Scott A, Alvord L et al. Wetting substantivity of a new hydrogen peroxide disinfecting solution on silicone hydrogel contact lenses. Poster presented at the 39th BCLA, Liverpool May 2015. 5. Lally J, Ketelson H, Borazjani R, et al. A new lens care solution provides moisture and comfort with today's contact lenses. Optician 4/1/2011, Vol 241 Issue 6296, 42-46. 6. Campbell R, Kame K, Leach N, Paul M, White E, Zigler L. Clinical Benefits of a New Multipurpose Disinfecting Solution in Silicone Hydrogel and Soft Contact Lens Users. Eye & Contact Lens 2012;38: 93-101. 7. Davis JW, Ketelson HA, Shows A and Meadows DL. A Lens Care Solution Designed for Wetting Silicone Hydrogel Materials. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract 3417.

Beachten Sie die Packungsinformation mit vollständigen Gebrauchs- und Sicherheitshinweisen.

Alcon Deutschland GmbH; Freiburg im Breisgau (Deutschland); www.de.alcon.com | Alcon Ophthalmika GmbH; Wien (Österreich) www.alcon.at | Alcon Switzerland SA, Zug (Schweiz), www.alcon.ch  
AT-ASH-2200002, DE: 900436119, AT: 2771, CH-DE: 900436120, CH-FR: 900436163 © Alcon 2022



# Sichere Anwendung für sicheres Kontaktlinsentragen

## AOSEPT®



**1. Vor dem Abnehmen:  
Hände waschen**  
Hände gründlich waschen  
und gut trocknen.




**6. Einlagerung und  
Neutralisation**  
Linsen mindestens 6 Stunden  
in der Lösung lassen.




**2. Linsen abnehmen**



**7. Vor dem Aufsetzen:  
Hände waschen**  
Hände gründlich waschen  
und gut trocknen.

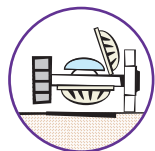


**3. Im Behälter platzieren**  
Rechte und linke Linse  
in die entsprechenden  
Körbchen einlegen.

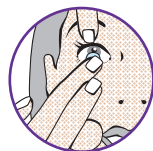


**8. Linsen aufsetzen**  
Bei Bedarf Linsen mit  
Kochsalzlösung (nicht  
AOSEPT®) abspülen  
und aufsetzen.



**4. Power-Dusche**  
Linsen im Körbchen  
5 Sekunden mit  
AOSEPT® abspülen.

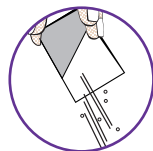

**9. Lösung ausgießen**  
Behälter ausgießen, mit  
Kochsalzlösung ausspülen  
und an der Luft trocknen  
lassen.

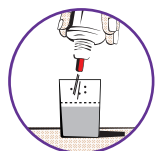


**5. Behälter befüllen**  
Behälter bis zum Markierstrich  
mit AOSEPT® füllen und ver-  
schließen.

**Weitere Informationen finden  
Sie in der Gebrauchsanweisung  
im Inneren der Packung.**


## OPTI-FREE®



**1. Vor dem Abnehmen:  
Hände waschen**  
Hände gründlich waschen  
und gut trocknen.

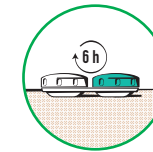


**6. Einlagerung**  
Linsen über Nacht, mindestens  
aber 6 Stunden in OPTI-FREE®  
lassen.

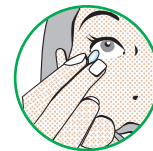


**2. Linsen abnehmen**



**7. Vor dem Aufsetzen:  
Hände waschen**  
Hände gründlich waschen  
und gut trocknen.

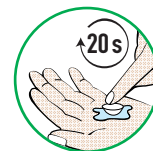


**3. Abreiben**  
Beide Seiten der Linsen  
gründlich mit OPTI-FREE®  
benetzen und 20 Sekunden  
reiben.

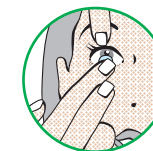


**8. Linsen aufsetzen**  
Linsen gründlich mit  
OPTI-FREE® abspülen  
und aufsetzen.



**4. Abspülen**  
Beide Seiten der Linsen  
10 Sek. lang mit einem  
stetigen Strahl OPTI-FREE®  
abspülen.

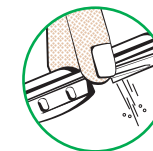

**9. Lösung ausgießen**  
Behälter ausgießen, mit  
OPTI-FREE® ausspülen und  
an der Luft trocknen lassen.

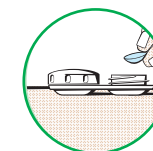

**5. Im Behälter platzieren**  
Rechte und linke Linse in die  
entsprechenden Körbchen  
einlegen und frische  
Pflegelösung einfüllen.

**Weitere Informationen finden  
Sie in der Gebrauchsanweisung  
im Inneren der Packung.**

**Für Ihre Notizen**

---



---



---



---



---