

Alcon<sup>®</sup>

### **Anwendung von OPTI-FREE PureMoist:**

Da es sich bei OPTI-FREE PureMoist um ein All-in-One-Pflegemittel handelt, benötigen Sie nur **eine Kontaktlinsenflüssigkeit für alle Pflegeschritte**:

- **Hygiene** ist bei der Kontaktlinsenpflege unentbehrlich. Zuerst waschen Sie die Hände gründlich und trocknen sie ab. Anschließend nehmen Sie die erste Kontaktlinse aus dem Auge und legen sie auf die saubere Handinnenfläche.
- Nun benetzen Sie beide Seiten der Linse mit dem OPTI-FREE PureMoist Pflegemittel und **reiben sie jeweils 20 Sekunden lang ab**. So werden Ablagerungen und Schmutz entfernt. Danach spülen Sie die Linsen auf beiden Seiten jeweils 10 Sekunden lang mit einem Strahl OPTI-FREE PureMoist.
- Dann legen Sie die Linse in den Kontaktlinsenbehälter und füllen diesen mit frischer Kontaktlinsenflüssigkeit. Das Gleiche machen Sie mit der anderen Kontaktlinse. Damit die Linsen intensiv gereinigt und desinfiziert werden, belassen Sie diese für **mindestens 6 Stunden** in der Flüssigkeit.
- Bevor Sie die Linsen am nächsten Morgen einsetzen, sollten Sie diese **erneut mit dem OPTI-FREE PureMoist Pflegemittel abspülen**. Die Aufbewahrungsflüssigkeit im Behälter gießen Sie weg, spülen das Döschen mit dem Pflegemittel aus und lassen es lufttrocknen.

### **Inhaltsstoffe:**

- OPTI-FREE PureMoist hat folgende Inhaltsstoffe: Natriumcitrat, Natriumchlorid, Borsäure, Aminomethylpropanol, Sorbitol, Dinatrium-EDTA, TETRONIC 1304, HydraGlyde Moisture Matrix (EOBO-41-Polyoxyethylenpolyoxybutylen), POLYQUAD (Polyquaternium-1) und ALDOX (Myristamidopropylmethylamin).