

FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH DIESES PRODUKTES, LESEN SIE BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE AUF

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung für REGARD® K RGP, eine wissenschaftliche Innovation bei der Pflege formstabiler Kontaktlinsen, die gleichermaßen für Komfort und Hygiene sorgt. REGARD® K RGP enthält ein aktives Desinfektionsmittel (den sog. OxyChlorite®-Komplex), das sich in die natürlichen Bestandteile (Salz und Wasser) des Tränenfilms verwandelt und dabei Sauerstoff freisetzt. Durch die Umwandlung gelangen keine schädlichen Konservierungsstoffe an das Auge, wie PHMB ist.

Mit REGARD® K RGP werden formstabile Kontaktlinsen gereinigt, abgespült, desinfiziert und benetzt; außerdem werden Proteine, die sich auf der Oberfläche bilden, entfernt.

REGARD® K RGP ist eine sterile, isotonische, gepufferte Lösung die Wasser, Natriumchlorid, Boratpuffer, Poloxamer, Hydroxypropylmethylcellulose, OxyChlorite® enthält.

Gebrauchsanweisung

• Versichern Sie sich, dass die Flasche versiegelt und der Verschluss unbeschädigt ist.

• Vor Handhabung der Linsen stets Hände gründlich waschen.

• Erste Kontaktlinse aus dem Auge nehmen, in die Hand legen, einige Tropfen REGARD® K RGP auf die Linse geben und vorsichtig reinigen.

• Gründlich mit REGARD® K RGP abspülen; kein Leitungswasser verwenden.

• Nur den original REGARD® K RGP Linsenbehälter benutzen. Entfernen Sie den Deckel der Behälterkammer in der Sie die entsprechende Linse lagern möchten (Deckel mit dem Herz für die linke Linse). Füllen die Kammer bis zur Kante mit REGARD® K RGP Lösung. Lagern Sie die Linse in der Kammer so, dass die äußere Kurve der Linse zum Kammerboden zeigt. Achten Sie darauf, dass die Linse so platziert wird, dass sie beim Schließen des Behälters nicht beschädigt wird.

Linse in den Behälter geben. Behälter mit REGARD® K RGP Lösung bis zum Rand füllen. Mit der zweiten Linse ebenso verfahren und zur Deckeldesinfektion kurz den geschlossenen Behälter umdrehen.

• Kontaktlinsen mindestens sechs Stunden oder über Nacht einlagern. REGARD® K RGP beseitigt schädigende Mikroorganismen und die von ihnen produzierten Enzyme und Toxine. Im verschlossenen Behälter können die Linsen bis zu dreißig Tage aufbewahrt werden. Danach erneut desinfizieren.

• Geben Sie vor dem Einsetzen 1 bis 2 Tropfen von REGARD® K RGP auf die Innenfläche der Linse um den Tragekomfort zu steigern.

• Behälter ausleeren, mit REGARD® K RGP ausspülen und geöffnet an der Luft trocknen lassen.

Vorsichtsmaßnahmen

Nicht verwenden wenn die Flasche oder das Siegel beschädigt ist. REGARD® K RGP nur einmal verwenden. Nach jedem Gebrauch Lösung wegschütten. Tropferspitze nicht berühren und Flasche nach Gebrauch sorgfältig verschließen. Bei Raumtemperatur lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nach Ablauf des Verfalldatums Lösung nicht mehr verwenden. Nach dem Öffnen 90 Tage haltbar; Lösung danach wegschütten.

Immer den frischen bei regard mitgelieferten linsenbehälter benutzen.

Wenn sie den linsenbehälter nicht mehr reinigen können oder er deformiert ist, ersetzen sie ihn gegen einen neuen.

Bei Augenirritationen Kontaktlinsenspezialisten aufsuchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht einnehmen.