

Produktbeschreibung des Herstellers



So geht's - Kontaktlinsenpflege mit Opti-Free Replenish

- 

1 BEHÄLTER
— MIT —
OPTI-FREE®
BEFÜLLEN
- 

2 KONTAKTLINSE
BEFEUCHTEN
UND
REIBEN
- 

3 10 SEKUNDEN
ABSPÜLEN
- 

4 IM BEHÄLTER
6 STUNDEN
AUFBEWAHREN

Stellen Sie vor dem Befüllen des mitgelieferten Kontaktlinsenbehälters sicher, dass Ihre Hände sauber und trocken sind.

Befeuchten Sie ihre Kontaktlinse von beiden Seiten mit Opti-Free Replenish und reiben Sie die Kontaktlinse von jeder Seite 10 Sekunden lang mit Ihren Fingern ab.

Spülen Sie jede Seite der Kontaktlinse anschließend gründlich 10 Sekunden lang ab.

Platzieren Sie die Kontaktlinsen im Behälter und bewahren Sie diese über Nacht, mindestens aber für 6 Stunden, im Behälter auf.